

KORTE HANDLEIDING HOMEFILL COMPRESSOR / VULLEN CILINDERS



GELEVERDE ONDERDELEN HOMEFILL SYSTEEM

- Compressor met aansluitslang voor concentrator
- Rek
- 2 stuks cilinders 1,4 / 1,7 Liter (met besparingsventiel of continu-flow) met 1 draagtas

INSTALLEREN VAN DE COMPRESSOR OP DE CONCENTRATOR PERFECT O₂

- Gebruik de apparatuur in een goed geventileerde ruimte.
- Zet het rek vast op de concentrator en zet de compressor hierop.
- Steek de stekker in het stopcontact (stekkerdoos met kort snoer is toegestaan).
- Verbindt de concentrator Perfect O₂ met de compressor door middel van de doorzichtige slang (Pas op : kwetsbaar clicksysteem).

BELANGRIJKE AANDACHTSPUNTEN

- Raadpleeg/informeer uw arts wanneer u de HomeFill cilinders met besparingsventiel gaat gebruiken. Het zuurstofspaaarsysteem geeft alleen bij iedere inademing zuurstof doordat er een drukverschil wordt gedetecteerd via de neusbriil. Een goede neus-ademhaling is dus noodzakelijk.
- Indien nodig kunt u het systeem zelf meenemen naar camping of andere reisbestemming. De concentrator en de compressor zijn uitsluitend *afzonderlijk van elkaar* en *recht* op te transporteren. Laat dus nooit tijdens transport de compressor op de concentrator staan. Laat uw leverancier altijd weten waar u het systeem mee naar toe neemt.

Continu-flow cilinder autonomie in uren

Flow stand	0,25	0,5	0,75	1,0	1,5	2,0	2,5	3	4	5	6	Vultijd
1,7 liter cilinder	16	8	5u 20	4	2u 40	2	1u 30	1u 20	1	50m	40m	2 uur 5 min

Zuurstof besparing cilinder autonomie in uren

Flow stand/instelling	1	2	3	4	5	Continu-flow 2l/min	Vultijd
1,4 liter cilinder	11,9	7,6	5,7	4,6	3,9	1 uur 40 min	1 uur 40 min
1,7 liter cilinder	14,3	9,1	6,9	5,6	4,7	2 uur 5 min	2 uur 5 min

VEILIGHEID




Het systeem minimaal 3 meter van iedere vlam verwijderd houden om een risico op brand uit te sluiten.



Gebruik geen brandbare materialen zoals olie, vet of oplosmiddelen. Deze kunnen spontaan ontbranden met zuurstof.



Roken is niet toegestaan tijdens gebruik of in de nabijheid van het systeem

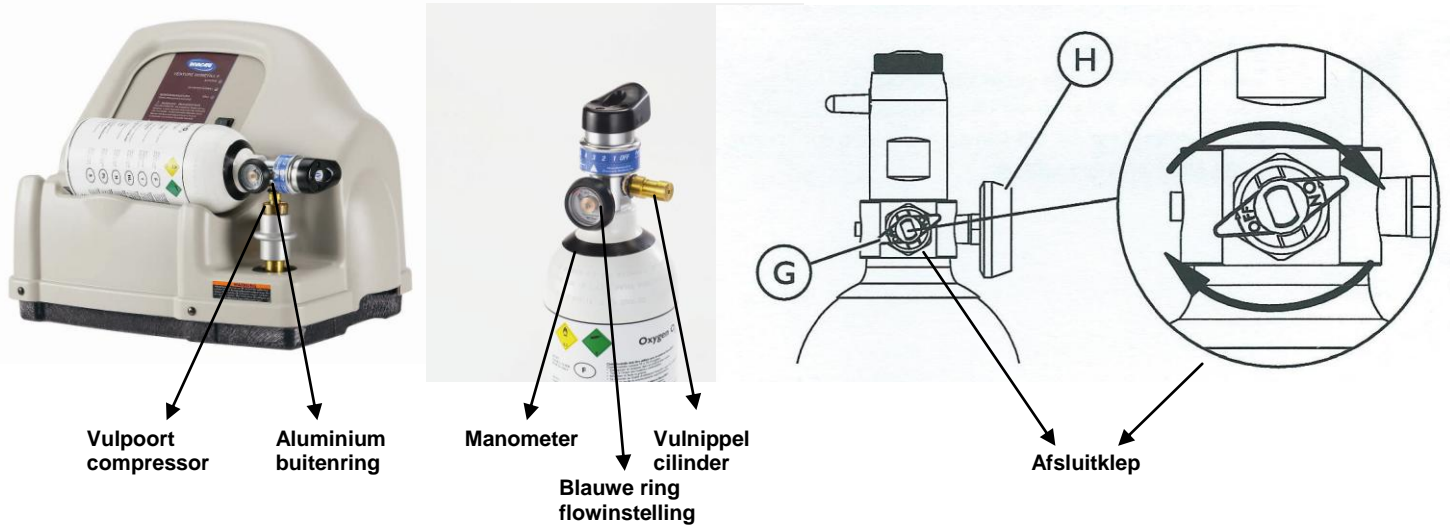

HET VULLEN VAN EEN CILINDER

1. Zet de concentrator PerfectO2 aan en laat deze vooraf enige tijd draaien vóór het inschakelen van de compressor. De flowinstelling moet minimaal 0,5 zijn.
2. Controleer de manometer van het cilindertje, deze MOET minder zijn dan 1500 anders vult deze niet ! Controleer of de cilinder met besparingsventiel op "OFF" staat en de continu-flow cilinder op "0" en afsluitklep (G) open.
3. Verwijder de afdektules van het vulnippel cilinder en vulpoort compressor.
4. Controleer of de groene stippen boven de aluminium buitenring van de vulpoort op de compressor zichtbaar zijn. Zo niet, druk de buitenring naar beneden.
5. Plaats de cilinder op de compressor en druk het cilinder vulnippel in de compressor vulpoort terwijl u de buitenring van de compressor gelijktijdig omhoog brengt. U hoort een "click".
6. Zet de compressor aan. Het gele lampje "O2 ONDER NORMAAL NIVEAU" gaat ongeveer 3 minuten branden tot de juiste vulconditie is opgebouwd. Pas wanneer het groene lampje "VULLEN" gaat branden is de compressor klaar om de cilinder te vullen. U hoort een kleine verandering in het geluid, dit is de pompfunctie van de compressor.
7. Wanneer het groene lampje "VOL" gaat branden is het vullen van de cilinder klaar (na +/- 2 uur).
8. ZET DE COMPRESSOR UIT.
9. Ontkoppel de cilinder door de aluminium buitenring van de compressor vulpoort naar beneden te drukken.
10. Plaats de afdektules terug op het vulnippel van de cilinder en op de vulpoort van de compressor. Vergeet dit niet, het voorkomt stof en vuil in de vulaansluitingen!
11. Controleer of de cilinder met besparingsventiel op "OFF" staat en de continu-flow cilinder op "0" en draai de afsluitklep (G) weer dicht!

GEbruik VAN DE CILINDER MET BESPARINGSVENTIEL

- Een cilinder is vol wanneer de manometer op ongeveer 2000 staat.
- Sluit het neusbrilletje aan op de cilinder.
- Draai de blauwe ring op de juiste flow-instelling.
- Adem door de neus en voel een pulsatie van zuurstof bij het inhaleren. Deze is merkbaar bij het begin van iedere inademing.
- Na gebruik: draai de blauwe ring weer op "OFF".

GEbruik VAN DE CONTINU-FLOW CILINDER

- Een cilinder is vol wanneer de manometer op ongeveer 2000 staat.
- Sluit het neusbrilletje aan op de cilinder.
- Open de afsluitklep (G) voorzichtig en draai de flow-schakelaar op de juiste instelling.
- Na gebruik: draai de afsluitklep (G) dicht en draai de flow-schakelaar op "0"

ONDERHOUD

- Na elk gebruik de compressor schoonmaken met een droge doek.
- Minstens 1 x per week de filters aan de achterkant van de compressor en de achterkant van de concentrator reinigen met de stofzuiger !!

VitalAire stelt u uiterst kostbare bruikleenapparatuur ter beschikking. Wij vertrouwen er op dat u deze met de nodige zorg en volgens de gebruikersinstructies zult hanteren. Voor schades ontstaan door oneigenlijk gebruik, wordt u als gebruiker aansprakelijk gesteld.