

# RESMED

## S9 AutoSet™ & S9 Elite™

POSITIVE AIRWAY PRESSURE DEVICES



### Welcome Guide

Nederlands

**S9**™ Series  
More. Comfort.

**S9**<sup>™</sup> | Series  
More. Comfort.

# Welkom

Dank u voor uw keuze van de S9 AutoSet of S9 Elite.  
Lees de Welkomgids en de Informatiegids volledig door  
alvorens deze apparaten te gebruiken.



Luchtuitlaat



DC-ingang  
Module-/adapterpoort  
Luchtfilter  
SD-kaartsleuf

## De S9 in een oogopslag

Het S9-systeem omvat de volgende onderdelen:

- S9-apparaat
- SlimLine-luchtslang
- Voedingseenheid van 90 W of 30 W
- S9-reistas
- SD-kaart
- Beschermhoesje voor de S9 SD-kaart.


Optionele onderdelen zijn:

- H5i verwarmde bevochtiger
- H5i-waterreservoir
- Standaardslang
- ClimateLine verwarmde slang
- ClimateLine<sup>MAX</sup> verwarmde slang
- Voedingseenheid van 90 W
- Voedingseenheid van 30 W (niet geschikt voor de H5i)
- Power Station II accu
- DC/DC-omvormer 24 V/90 W.

## Reistips

Als u alleen de S9 mee op reis neemt:

- Vergeet dan niet om de SlimLine- of Standaardluchtslang mee te nemen. De ClimateLine of ClimateLine<sup>MAX</sup> verwarmde luchtslang is namelijk niet bedoeld om rechtstreeks op het S9-apparaat aangesloten te worden.
- Zorg ervoor dat u een elektriciteitsnoer koopt en op reis meeneemt dat is goedgekeurd voor de regio waarin u het S9-apparaat gaat gebruiken.

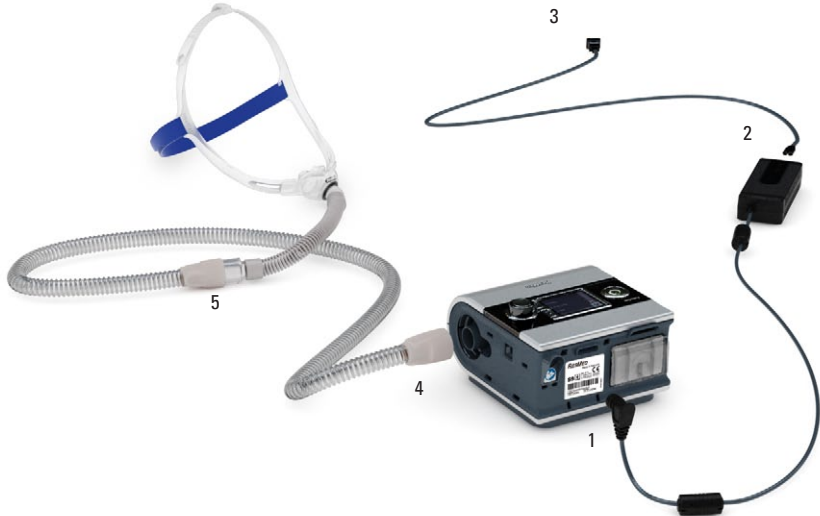

## Opstelling

1. Steek de DC-stekker van de voedingseenheid in de achterkant van de S9.
2. Sluit het elektriciteits snoer op de voedingseenheid aan.
3. Steek het andere uiteinde van het elektriciteits snoer in een stopcontact.
4. Sluit een uiteinde van de luchtslang stevig aan op de luchtuitlaat.
5. Sluit het in elkaar gezette maskersysteem op het vrije uiteinde van de luchtslang aan.

### **NB**

- Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw masker voor meer informatie over het in elkaar zetten van het masker.
- Aanbevolen maskers kunt u vinden op [www.resmed.com](http://www.resmed.com) op de pagina Products onder Service & Support.

**Start-/stopknop**  
Start of stopt de  
behandeling.

**Home-menu**

**LCD-scherm**


**Informatiemenu**  
Hier kunt u uw  
slaapstatistieken  
bekijken.


**Instellingen-  
menu**  
Hier kunt u  
instellingen  
aanpassen.


**Draai-/drukknop**  
Door aan deze  
knop te draaien,  
kunt u door het  
menu bladeren en  
instellingen wijzigen.  
Door de knop in te  
drukken, kunt u een  
menu openen en uw  
keuze bevestigen.

**Legenda:**

Home 


Vochtigheids-  
niveau 


Aanloop 


Verwarme  
slang 

Climate Control 

Start/stop 

Draai-/drukknop 

Instellingenmenu 

Informatiemenu 





## Het bedieningspaneel van de S9

Het bedieningspaneel van uw S9-apparaat heeft een LCD-scherm, een start-/stopknop, draai-/drukknop en de toetsen Informatiemenu en Instellingenmenu.

## De aanlooptijd aanpassen


De aanlooptijd is de periode gedurende welke de druk toeneemt van een lage startdruk naar de voorgescreven behandelingsdruk en is erop gericht om het begin van de behandeling prettiger te laten verlopen. U past de aanlooptijd als volgt aan:

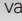


1. Draai vanaf het home-scherm aan  totdat het scherm AANLOOP in blauw weergegeven wordt.
2. Druk op . De selectie wordt oranje gemarkeerd.
3. Draai aan  totdat de aanlooptijd die u nodig heeft, weergegeven wordt.
4. Druk op  om uw keuze te bevestigen.

## De maskerpasvorm bijstellen

Gebruik de maskerpasvorm-functie om uw masker goed te laten passen. Deze functie levert voorafgaand aan de behandeling gedurende drie minuten behandelingsdruk. Tijdens deze periode kunt u uw maskerpasvorm controleren en bijstellen, om lekkage tot een minimum te beperken.

1. Zet uw masker op zoals omschreven in de gebruikershandleiding van uw masker.
2. Houd vanaf het home-scherm  gedurende drie seconden ingedrukt. Een van de volgende MASKERPASVORM-schermen wordt weergegeven:



3. Stel het masker, het kussentje en de hoofdband indien nodig bij voor een goede maskerpasvorm. Na drie minuten keert de druk terug naar de ingestelde druk en begint de behandeling. U kunt het bijstellen van de maskerpasvorm op elk gewenst moment beëindigen door op  te drukken.

## Het maskertype selecteren

Selecteer uw maskertype als volgt:



1. Druk op . Het scherm INSTELLINGEN wordt weergegeven.



2. Draai aan  totdat Masker blauw gemarkeerd wordt.




3. Druk op . De selectie wordt oranje gemarkeerd.





4. Draai aan  totdat de maskerinstelling die u nodig heeft, weergegeven wordt.



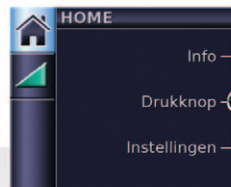

5. Druk op  om uw keuze te bevestigen.



6. Druk op  om naar het home-scherm terug te keren.



## Aan de slag

1. Controleer of het apparaat op de stroom aangesloten is.
2. Pas de aanlooptijd indien nodig aan.
3. Zet uw masker op zoals beschreven in de gebruikershandleiding van uw masker.
4. Adem simpelweg in het masker en/of druk op  om de therapie te starten.
5. Ga in bed liggen en leg de luchtslang zo, dat deze vrij kan bewegen als u zich in uw slaap omdraait.
6. Om de behandeling op elk willekeurig ogenblik te stoppen, zet u het masker af en/of drukt u op .

### **NB**

- Als uw arts SmartStart ingeschakeld heeft, start uw apparaat automatisch wanneer u in het masker ademt en stopt het automatisch wanneer u het masker afneemt.
- Nadat de therapie is gestart, verschijnt een behandelingsscherm.
- Als de stroom is onderbroken tijdens de behandeling, zal het apparaat de behandeling direct hervatten wanneer er weer stroom is.



## Reiniging en onderhoud

Raadpleeg de gebruikershandleidingen van uw masker en bevochtiger voor uitgebreide instructies over het onderhoud van deze apparaten.

### Dagelijks

Verwijder de luchtslang door aan de vingergrepen op de manchet te trekken. Hang de slang zolang deze niet wordt gebruikt op een schone en droge plek.

### Wekelijks

1. Haal de luchtslang van het S9-apparaat en het masker.
2. Was de luchtslang in warm water met een mild reinigingsmiddel.
3. Grondig spoelen, ophangen en laten drogen.
4. Maak de luchtslang voor het volgende gebruik opnieuw aan de luchtuitlaat en het masker vast.

### Maandelijks


1. Veeg de buitenkant van de S9 met een vochtige doek en een mild reinigingsmiddel schoon.
2. Controleer het luchtfilter op eventuele gaten of verstoppingen door vuil of stof. Vervang indien nodig het luchtfilter.

### Vervangen van het luchtfilter

Vervang het luchtfilter per maand (of vaker indien nodig).

1. Verwijder het luchtfilterdeksel van de achterzijde van het S9-apparaat.
2. Verwijder het oude luchtfilter en gooi het weg.
3. Plaats een nieuw ResMed luchtfilter. Let er daarbij op dat het luchtfilter plat in de luchtfilterdeksel zit.
4. Plaats het luchtfilter-deksel terug.

Luchtfilterdeksel

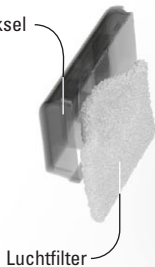

Luchtfilter



## SD-kaart

U heeft een SD-kaart gekregen waarop de therapiegegevens van uw S9-apparaat verzameld kunnen worden en waar uw arts nieuwe therapie-instellingen op kan zetten. Indien uw arts dit vraagt, verwijdert u de stekker van het S9-apparaat uit het stopcontact, verwijdert u de SD-kaart, stopt u deze in het beschermhoesje en stuurt u hem aan uw arts op.

## De kaart verwijderen

1. Duw de kaart iets naar binnen om hem te kunnen verwijderen.
2. Verwijder de kaart.
3. Stop de kaart in het beschermhoesje.
4. Stuur de kaart in het beschermhoesje volgens de instructies naar uw arts terug.

Raadpleeg het beschermhoesje van de S9 SD-kaart dat bij uw apparaat geleverd is voor meer informatie over het verwijderen en plaatsen van uw kaart. Bewaar het beschermhoesje van de S9 SD-kaart voor later gebruik.



## NB

- Raadpleeg de informatiegids voor informatie over het opsporen en oplossen van problemen.
- Kijk voor meer productinformatie op [www.resmed.com](http://www.resmed.com).

**S9**<sup>™</sup> | Series  
More. Comfort.

368707-Dut/1 2012-01

S9 Series  
AutoSet & Elite

WELCOME  
**EUR 1/3**



**Manufacturer:** ResMed Ltd 1 Elizabeth Macarthur Drive Bella Vista NSW 2153 Australia. **Distributed by:** ResMed Corp 9001 Spectrum Center Boulevard San Diego CA 92123 USA. **EC REP** ResMed (UK) Ltd 96 Milton Park Abingdon Oxfordshire OX14 4RY UK. See [www.resmed.com](http://www.resmed.com) for other ResMed locations worldwide.

For patent information, see [www.resmed.com/ip](http://www.resmed.com/ip).

S9, H5i, SlimLine, ClimateLine, and ClimateLine<sup>MAX</sup> are trademarks of ResMed Ltd and S9 and ClimateLine are registered in U.S. Patent and Trademark Office.

© 2012 ResMed Ltd.

