

Verbruiksartikelen

Raadpleeg *Hoofdstuk 4, "Reiniging en onderhoud"* in de gebruikershandleiding van de myAIRVO 2 voor informatie over verbruiksartikelen. De myAIRVO 2 bevat vier artikelen die u regelmatig moet vervangen om het apparaat zo schoon mogelijk te houden. Voor het aantal keer dat hieronder wordt aanbevolen wordt ervan uitgegaan dat de myAIRVO 2 door slechts één persoon wordt gebruikt en dat de juiste reinigingsprocedures worden gevolgd.



30 **Optiflow™+ neuscanule**
Om de 30 dagen vervangen.
Productcode: OPT942E (small)
OPT944E (medium)
OPT946E (large)



Nabestelcode:

60 **Verwarmde beademings slang**
Om de 60 dagen vervangen.
Productcode: 900PT560E (rechtsboven)
900PT500E (rechtsonder)



Nabestelcode:

90 **Luchtfilter**
Om de 90 dagen of 1000 uur vervangen.
Productcode: 900PT913
(verpakking met 2 stuks)



Nabestelcode:

N/A **HC360 herbruikbare waterkamer**
Productcode: HC360



Nabestelcode:

Sommige producten zijn mogelijk niet in uw land beschikbaar. Neem contact op met uw plaatselijke Fisher & Paykel Healthcare-vertegenwoordiger.

Contactgegevens voor ondersteuning en bestellingen

www.fphcare.com/myairvo

Belangrijke opmerking: Dit is slechts een snelstartgids; hij vormt in geen geval een substituuut voor de gebruikershandleiding van de myAIRVO 2. Voordat u de myAIRVO 2 gebruikt, dient u de gebruikershandleiding van de myAIRVO 2 door te lezen om het beoogd gebruik, de waarschuwingen en aandachtspunten van het apparaat te leren begrijpen. De myAIRVO 2 is niet bedoeld voor ondersteuning van vitale lichaamsfuncties.

Installatiestappen voor de myAIRVO 2 met de HC360 herbruikbare waterkamer

Raadpleeg *hoofdstuk 2, "De myAIRVO 2 instellen"* en *hoofdstuk 3, "De myAIRVO 2 gebruiken"* in de gebruikershandleiding van de myAIRVO 2 voor informatie over het installeren.

<p>1</p> <p>Zet de myAIRVO 2 op een lage plank of op de vloer naast uw bed. Zorg dat het apparaat lager dan uw hoofd en op een horizontale ondergrond staat.</p>	<p>2</p> <p>Vul de kamer met behulp van de meegeleverde trechter met voldoende gedestilleerd water voor de gebruiksperiode maar nooit tot boven de 560 mL-markering voor het maximale waterniveau.</p>
<p>3</p> <p>Sluit de waterkamer aan op het apparaat door de beschermrand omlaag te drukken en vooruit te duwen totdat deze vastklikt.</p>	<p>4</p> <p>Sluit de verwarmde beademings slang aan op de myAIRVO 2.</p>
<p>5</p> <p>Sluit het netsnoer van de myAIRVO 2 aan op de achterkant van het apparaat en steek de stekker in het stopcontact.</p>	<p>6</p> <p>Schakel de myAIRVO 2 in door de aan/uit-knop 5 seconden ingedrukt te houden. De myAIRVO 2 begint met opwarmen en er verschijnt een opwarmsymbool op het scherm.</p>
<p>7</p> <p>Als de myAIRVO 2 klaar is voor gebruik, wordt er een vinkje weergegeven.</p>	<p>8</p> <p>Sluit de interface aan en begin de therapie. Als er tijdens het gebruik veel condens in de slang ontstaat, raadpleeg dan <i>Condensbeheersing</i> in <i>hoofdstuk 2, "De myAIRVO 2 instellen"</i>.</p>


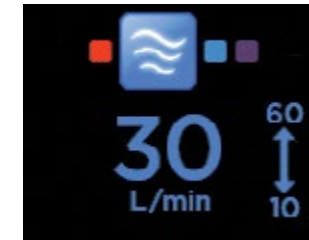


Overzicht van de myAIRVO 2-knoppen

Raadpleeg hoofdstuk 3, "De myAIRVO 2 gebruiken" in de gebruikershandleiding van de myAIRVO 2 voor informatie over het gebruik van de myAIRVO 2.

 <p>Aan/uit-knop U schakelt de myAIRVO 2 in door de aan/uit-knop 5 seconden ingedrukt te houden. Houd deze knop na gebruik 3 seconden ingedrukt om naar de droogmodus te gaan. Het apparaat wordt na 99 minuten automatisch uitgeschakeld.</p>	 <p>Geluidspauze-knop Met de Geluidspauze-knop kunt u de geluidsalarmen tijdelijk onderdrukken.</p>
 <p>Modus-knop Met de Modus-knop kunt u door de modi lopen: • Temperatuur • Flowsnelheid • Dag/nacht • Compliantie</p>	 <p>Omhoog- en Omlaag-knoppen Met de knoppen Omhoog en Omlaag wijzigt u de instellingen in de volgende modi: • Temperatuur • Flowsnelheid • Dag/nacht</p>

De myAIRVO 2-modi en -instellingen in de standaardmodus

Raadpleeg hoofdstuk 3, "De myAIRVO 2 gebruiken" in de gebruikershandleiding van de myAIRVO 2 voor informatie over het gebruik van de myAIRVO 2. De myAIRVO 2 onthoudt uw instellingen wanneer u het apparaat uitschakelt.

 <p>Temperatuurmodus Gebruik de knoppen Omhoog en Omlaag om te wisselen tussen de volgende temperaturen: 31 °C, 34 °C en 37 °C.</p>	 <p>Flowsnelheidsmodus Gebruik de knoppen Omhoog en Omlaag om een flowsnelheid te selecteren van 10-60 L/min. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de myAIRVO 2 voor informatie over flowbereiken voor uw interface.</p>
 <p>Dag-/nachtmodus Gebruik de knoppen Omhoog en Omlaag om te wisselen tussen Dagmodus en Nachtmodus. In de Nachtmodus worden sommige audiosignalen stiller en wordt het scherm gedimd.</p>	 <p>Compliantiemodus In de Compliantiemodus wordt er automatisch tussen de statistieken voor apparaatgebruik gewisseld: • Totaal aantal gebruiksuren • Aantal uren per dag • Controlecijfer (voor de arts)</p>

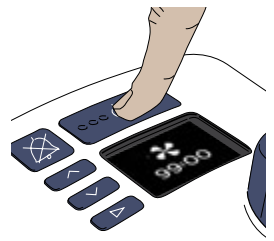
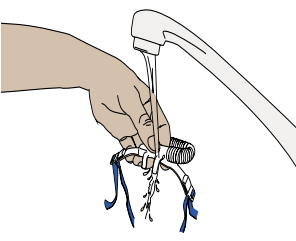

Visuele en akoestische alarmen op de myAIRVO 2

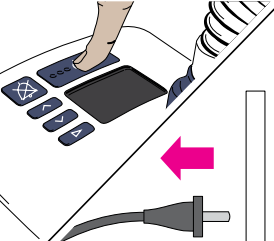
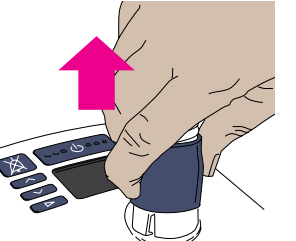
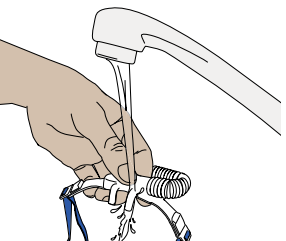
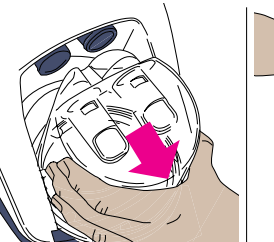

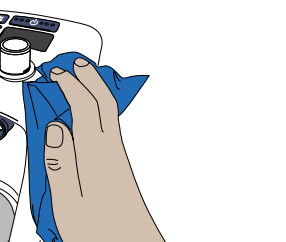
Raadpleeg hoofdstuk 3, "De myAIRVO 2 gebruiken" in de gebruikershandleiding van de myAIRVO 2 voor informatie over alarmen. De myAIRVO 2 heeft alarmen die u waarschuwen voor onderbrekingen in uw behandeling. Druk op de Geluidspauze-knop om het alarm 115 seconden te onderdrukken.

<p>Geluidspauze-knop</p> 	 <p>Controleer op verstoppingen</p>		
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------

De myAIRVO 2 reinigen

Raadpleeg hoofdstuk 3, "De myAIRVO 2 gebruiken" en hoofdstuk 4, "Reinigen en onderhouden" in de gebruikershandleiding van de myAIRVO 2 voor informatie over het schoonmaken van de myAIRVO 2.

Dagelijkse reiniging		
<p>1</p> 	<p>2</p> 	<p>3</p> 
<p>Na gebruik zet u de interface af. Houd de aan/uit-knop 3 seconden ingedrukt om de 99 minuten durende droogmodus te starten. Draag de interface niet als het apparaat in de droogmodus staat (om brandwonden te voorkomen), en verwijder de waterkamer pas als de droogmodus is voltooid.</p>	<p>Spoel de interface af met water van drinkkwaliteit en sluit hem weer aan op de verwarmde beademingsslang terwijl het apparaat nog in droogmodus is, zodat de interface kan drogen.</p>	<p>Verwijder de waterkamer nadat de droogmodus is voltooid door de beschermrand omlaag te duwen en de kamer naar buiten te trekken. Was en spoel de kamer en vul deze opnieuw volgens de installatiestappen op de vorige pagina.</p>

Wekelijkse reiniging		
<p>1</p> 	<p>2</p> 	<p>3</p> 
<p>Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact.</p>	<p>Verwijder de verwarmde beademingsslang en voer overtollig condens af.</p>	<p>Maak de interface los van de verwarmde beademingsslang, was hem in warm water met wat mild afwasmiddel, spoel hem met water van drinkkwaliteit en sluit hem weer aan op de verwarmde beademingsslang.</p>
<p>4</p> 	<p>5</p> 	<p>5</p> 
<p>Verwijder de waterkamer. Laat eventueel resterend water weglopen. Verwijder de kamerbodem. Was de bovenkant van de kamer en de bodem met wat mild afwasmiddel en spoel ze daarna af. Laat de kamer 10 minuten in een oplossing van azijn (1 deel) en water (2 delen) liggen. Spoelen en drogen.</p>		<p>Veeg de binnenkant van de aansluitpoort voor de verwarmde beademingsslang grondig schoon met een schone, pluisvrije doek die in warm water met wat mild afwasmiddel is gedoopt. Veeg de buitenkant van het apparaat schoon met een schone, vochtige (niet natte) doek die in warm water met wat mild afwasmiddel is gedoopt.</p>

Als de reiniging is voltooid, maakt u de myAIRVO 2 weer gereed aan de hand van de eerder beschreven installatiestappen.